



TheraTurn er det komplette madrassystem, der både er tryksårsforebygger og tilbyder vending af patienten. Vending samt hyppighed og graden heraf kan indstilles helt individuelt.

Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner. **TheraTurn** kan håndtere patienter op til 375 kg og leveres i bredder helt op til 180 cm.



IVÆRKSÆT VENDING

Thera Turn

Tryk Thera Turn knappen. Madrassen iværksætter foruddefineret venderegime. (indstillet af Hospitech)

AFSLUT VENDEREGIME

Maximum Inflate

Tryk på Thera Turn knappen eller Maximum Inflate.

HÅRD MADRAS

Maximum Inflate

Tryk på Maximum Inflate knappen. Madrassen afslutter automatisk venderegime og bliver hård. Madrassen vender selv tilbage til dynamisk funktion efter 20 minutter.

DYNAMISK FUNKTION

Alternating Pressure

Aktiver Alternating Pressure knappen. Madrassen iværksætter dynamisk funktion i en cyklus af 5 minutter.

TRANSPORT

Thera Turn

Stikket tages ud af stikkontakten. Efter endt transport sættes stikket igen i stikkontakten og madrassen "husker" indstillingen. Ønskes venderegime genoptaget aktiveres Thera Turn knappen.

SIDDEDE STILLING

Fowler Boost

Ved siddende stilling, mere en 30 aktiveres Fowler Boost knappen.

LUFTS CIRKULATION

Low air loss

Ved et ønske om frisk lufts cirkulation i madrassen aktiveres Low air loss knappen. Funktionen deaktiveres ved endnu et tryk på knappen.

ALARM

Hotline tlf. 20 31 19 84

Ved funktionsfejl, herunder lækage i madrassen lyder en alarm og madrassens display blinker. Kontakt straks Hospitechs hotline.

NB! Har du problemer eller spørgsmål, kan du kontakte hotline.

