



TheraTurn er det komplette madrassystem, der både er tryksårsforebygger og tilbyder vending af patienten. Vending samt hyppighed og graden heraf kan indstilles helt individuelt.


Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner. **TheraTurn** kan håndtere patienter op til 375 kg og leveres i bredder helt op til 180 cm.

INSTALLATION

- A. Madrassen rulles ud i en tom seng
- B. Madrassens stropper fastgøres til sengebundens bevægelige dele.
På den måde kan sengens funktioner benyttes sammen med madrassen
- C. Styreenheden placeres på sengens fodende. Der er flere placeringsmuligheder
- D. Styreenheden sluttes til madrassen ved, at tilslutte den medfølgende samling af slanger til madrassen. Madrassen placeres således af slangetilslutningen findes i venstre side.
- E. Slangetilslutningen føres ind i madrassen og drejes indtil den stopper med et lille klik
- F. Styreenhedens strømkabel kan nu tilsluttes stikkontakten
- G. Styreenheden kan tændes på den røde hovedafbryder på højre side
- H. På højre side af styreenheden monteres slangen til "low Air Loss" (frisk luftcirkulation til madrassen)

BETJENING

Madrassystemet styres via styreenhedens funktionstaster.

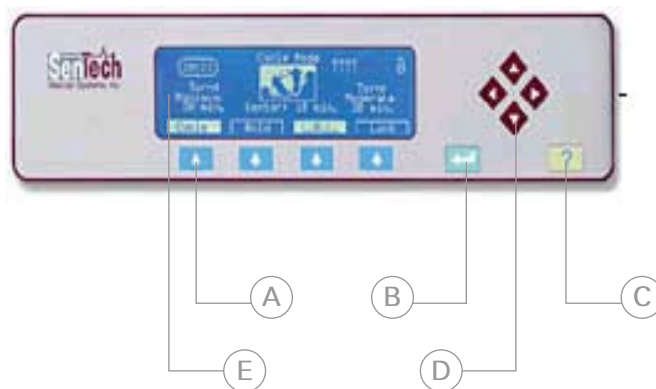

- A. De blå pile er menutaster som refererer til den ovenfor angivne funktion.
- B. Den grønne knæk-pil afslutter enhver indtastning - på samme måde som enter-tasten på din computer.
- C. Det gule spørgsmålstegn giver dig adgang til hjælpeteksten
- D. De bordeaux pile hjælper dig med at navigere igennem de enkelte menuer
- E. Displayet viser den igangværende funktion

BASIS FUNKTIONALITET

- A. Cycle – giver mulighed for automatisk vending af patienten til venstre, til højre eller vending til begge sider.
- B. Hold stopper vending enten på ryggen, på højre side eller på venstre side.
- C. L.A.L er friskluftsventilation i madrassen
- D. MAX Firm gør madrassen hård til brug for håndtering af patienten, når patienten tages ind eller ud af madrassen eller ved soignering.
- E. Lock låser og låser styreenhedens funktionstaster. Benyttes når man vil sikre, at der ikke ændres på madrassens indstillinger af uvedkommende.

I styreenhedens hovedmenu, kan du hele tiden se menuvalgsmulighederne samt madrassens aktuelle funktion, herunder vending og hvor lang tid der er tilbage af den igangværende funktion. Du kan ligeledes se om friskluftstilførslen er sat i gang.

1. Patientens vægt og højde skal indtastes for korrekt trykudligning og således styreenhedens computer kan beregne korrekte værdier i forbindelse med vending. Tryk på den bordeaux piletast til højre. "Weigth" bliver fremhævet i displayet. Herefter benyttes de blå piletaster under displayet til at indtaste patientens korrekte vægt.
2. Tryk igen på de bordeaux piletaster til højre og "turn" bliver fremhævet i displayet. Du kan nu vælge en af 4 foruddefinerede vende programmer for henholdsvis Højre/venstre samt tidsinterval, angivet i minutter på højre, ryg og venstre side.
3. Når du taster på den grønne knæpil til højre for displayet, bekræfter du din indstilling og vendefunktionen starter. Ønsker du at standse vendefunktionen trykker du på den blå piletast under funktionen "HOLD" enten Left/Right/Center.

SÆRLIGE FUNKTIONER

A

- A. Hygiejnefilter: Styreenheden er forsynet med et hygiejnefilter. Dette filter skal renses én gang hver måned. Når det er tid til at rense filter, vil styreenhedens panel give information herom. Har du serviceaftale eller lejer du madrassen af Hospitech trykker du på piletasten under "remind me later" og kontakter Hospitech. Har du selv rensset filteret trykker du på "filter has been replaced".
- B. Alarm: Madrassystemer er udstyret med et alarmsystem. Alarmen fremkommer med et særligt billede i displayet såfremt madrassen ikke kan opnå det computerberegnete tryk. Ved alarm sikres alle slange tilslutninger. Alarmen kan slukkes ved et tryk på pilen under "alarm off"
- C. Turn (vending) aktiveres ved tryk på pilen under "cycle". Der kan i "patient Settings" vælges mellem ingen vending, lille vending, moderat vending og maksimal vending. Der kan ligeledes vælges det tidsinterval der skal vendes.



PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Alarm lyder/lyser	<ul style="list-style-type: none">Luftcellerne når ikke det computerberegneede tryk inden for en periode på 20 minutter.Systemet har været på MAX i mere end 30 minutter.	<ul style="list-style-type: none">Du skal sikre dig at alle slangeforbindelse er tilsluttet korrektUndersøg om der er opstået skade på luftcellerNår problemet er løst vil alarmen selv stoppe. For at nulstille systemet, kan ligeledes vælge at slukke for styreenheden.
Patienten vender for meget eller for lidt	<ul style="list-style-type: none">Indstillingen for netop denne patient er forkert.	<ul style="list-style-type: none">Du skal sikre dig at patientens vægt er angivet korrekt.Du har valgt for lille/stor vending. Du kan regulere vendingen ved at trykke på ? og derefter på funktions-tasten under "Patient Settings". Herefter navigerer du med de bordeaux pile til du står i valg af vending til den ønskede side. Gentle/Moderate/Maximum vælges således vendingen kommer i overensstemmelse med den ønskede terapi.
Displayet viser uklare billeder	<ul style="list-style-type: none">Systemet kan have været udsat for lav/høj spænding som følge af tordenvejr eller overgang til nødstrøm.	<ul style="list-style-type: none">Systemet nulstilles ved at slukke for styreenheden i ganske få sekunder. Styreenheden husker de indstillinger som du har lagt ind.

HOTLINE

Opstår der problemer som du ikke umiddelbart kan løse, kontakter du Hospitech's hotline.

Du kan ringe 24 timer i døgnet 365 dage om året

Hotline tlf. 20 31 19 84

