

Brugervejledning for Sentry TS 508-8 Madrassen



Sentry TS 508-8 er det tryksårsforebyggende madrassystem, der kan pumpes op mens patienten ligger på madrassen.

Sentry TS 508-8 er let at indstille og terapiformen med variabel cyklustid indstilles individuelt.

Ved et enkelt tryk på "Auto Firm Mode" (Nursing) bliver madrassen hård og patienten håndteres let.

Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner.

Sentry TS 508-8 kan håndtere patienter op til 200 kg.

Har du spørgsmål til Sentry TS 508-8 så kontakt hotline på 7640 1984. Hotline er døgnbemandet alle årets dage.

Madrassens opbygning:

- Madrassens åndbare overtræk kan lynes af og udskiftes.
- I det øverste kabinet har madrassen 21 luftlammeller på den brede led.
- I det nederste kabinet har madrassen en 5 cm høj skummadras.
- **CPR:** Ved hjertestop hives i den gule strop med "CPR" og madrassen tømmes for luft i luftlammellerne fra hovedenden til midt på. Patientens komfort er sikret med skummadrasen i det nederste kabinet.




Placering af madrassen:

- For hurtig opredning er madrasserne markeret med "fodafttryk" i fodenden.
- Madrasidentifikation med strekkode giver overblik over forbrug.



Brugervejledning for Sentry TS 508-8

Styreenheden

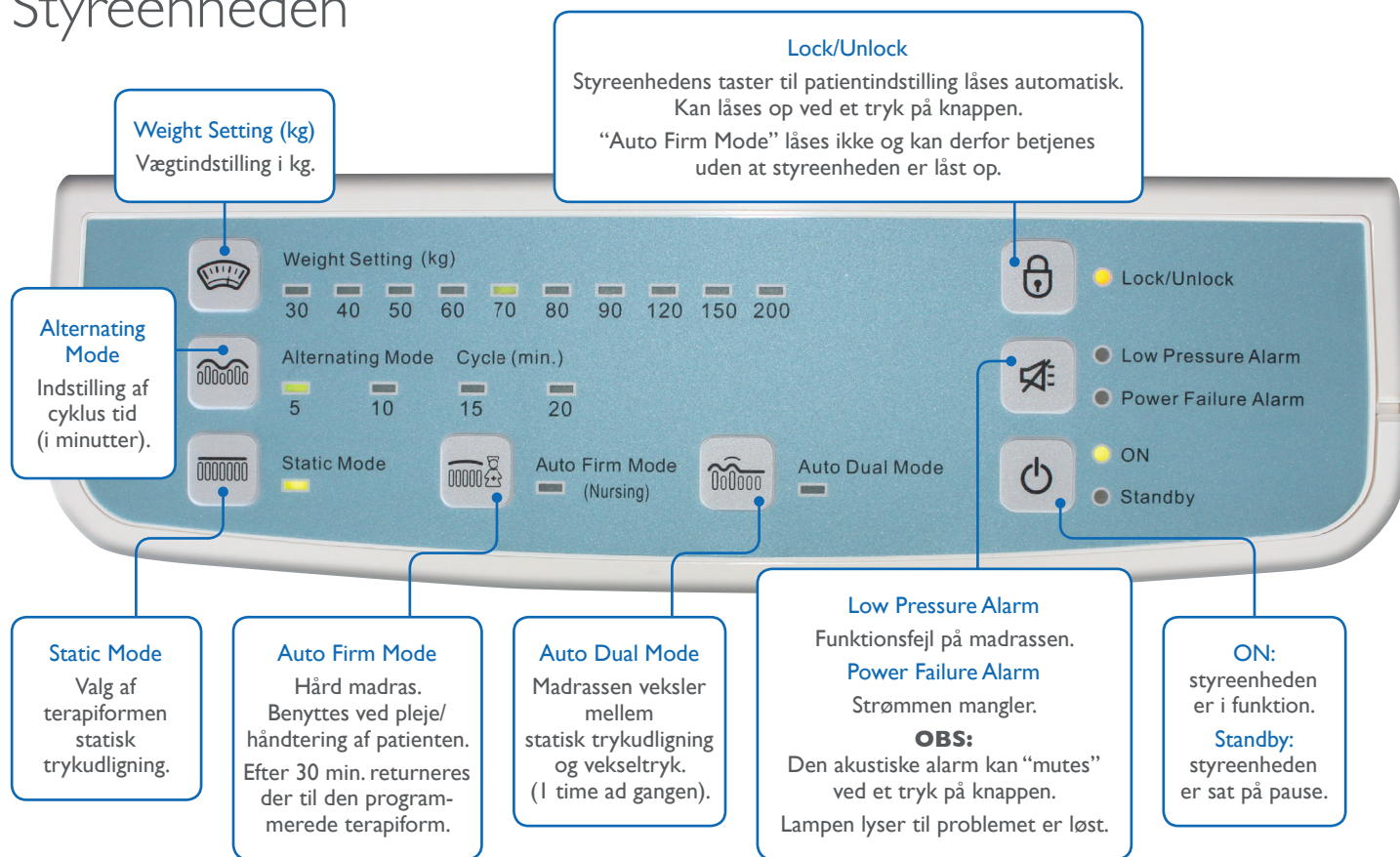

Opsætning af madrassen

1. Madrassen placeres i en tom seng.
2. Madrassens to slanger kobles til styreenheden på styreenhedens venstre side.
3. Ledningen tilsluttes styreenheden på venstre side og sættes i stikkontakten. Hovedafbryderen på styreenhedens venstre side aktiveres.
4. Madrassens stropper fastgøres til den bevægelige del af sengebunden.
OBS: Ledningen kan med fordel føres langs madrassen og fikseres med madrassens stropper.
Der er seks stropper:
– to i hver side,
– en i hovedenden og
– en i fodenden.
5. Du kan nu placere patienten i madrassen.
6. Du aktiverer nu styreenhedens "ON/Standby" knap til "ON" lyser. Pumpen starter.



Indstilling af vægt og cyklus

Patienten kan ligge i madrassen, når den indstilles.

1. Patient vægt



Indstil ved at taste på "Weight Settings" til den grønne lampe under den ønskede vægt lyser.

2. Cyklus tid (Alternating Mode)



Indstil ved at taste på "Alternating Mode" til den grønne lampe under den ønskede cyklus tid lyser.

3. "Static Mode" blinker indtil madrassen er helt fyldt.
4. Der er luft under patienten efter ca. 5 min. Madrassen når normal driftstilstand efter ca. 10 min. Madrassen når "Auto Firm Mode" (helt hård) efter ca. 20 min.
5. Madrassen vender automatisk tilbage til "Alternating Mode" (cyklus) når den er helt fyldt.

Pleje/håndtering af patienten

Skal du håndtere patienten under normal drift, skal du aktivere "Auto Firm". Funktionen vender automatisk tilbage til den ønskede terapiform efter 30 minutter.

Transport

Før:

- Ved transport tager du bare stikket ud af stikkontakten.
- Efter et minut lyder der en akustisk alarm.
- Du kan frakoble alarmen ved at trykke på højttalerikonet.
- "Power Failure Alarm" vil lyse ind til stikket sættes i stikkontakten igen.

Efter:

- Efter transport sættes stikket i stikkontakten og madrassen husker tidligere indstillinger.
- Madrassen holder luften under patienten i mindst 18 timer.